

Tube Extensor Safeed

Instruções de Uso

Estéril e apirogênico se a embalagem unitária não estiver aberta ou deteriorada.

Ao abrir a embalagem unitária, usar imediatamente.

Não utilizar se a embalagem unitária ou o produto estiver sujo e/ou danificado.

Indicação de Uso

Os conectores devem estar secos para garantir boa conexão. Não desinfete os conectores com álcool. Não utilize este tubo com meio de contraste oleoso ou solução que contenha álcool.

Tubo extensor descartável que pode ser conectado a um equipo, torneira de três vias ou dispositivo intravenoso. Pode ser usado em procedimentos de anestesia intravenosa, terapia intravenosa e transfusão de sangue.

Instruções de Uso:

Remover o tubo extensor da embalagem unitária de maneira asséptica. Adaptar aos dispositivos a serem utilizados no procedimento.

Produto de Uso Único. Proibido Reprocessar.

Modelos Disponíveis

Tubo Extensor Safeed, 25 cm, vol. Interno 2,0 mL, conector Luer
Tubo Extensor Safeed, 50 cm, vol. Interno 0,5 mL, conector Luer
Tubo Extensor Safeed, 50 cm, vol. Interno 1,7 mL, conector Luer
Tubo Extensor Safeed, 50 cm, vol. Interno 3,8 mL, conector Luer
Tubo Extensor Safeed, 75 cm, vol. Interno 2,5 mL, conector Luer
Tubo Extensor Safeed, 75 cm, vol. Interno 5,5 mL, conector Luer
Tubo Extensor Safeed, 100 cm, vol. Interno 1,0 mL, conector Luer
Tubo Extensor Safeed, 100 cm, vol. Interno 3,5 mL, conector Luer
Tubo Extensor Safeed, 25 cm, vol. Interno 2,0 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 50 cm, vol. Interno 0,5 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 50 cm, vol. Interno 1,7 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 50 cm, vol. Interno 3,8 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 75 cm, vol. Interno 2,5 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 75 cm, vol. Interno 5,5 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 25 cm, vol. Interno 0,25 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 75 cm, vol. Interno 0,75 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 100 cm, vol. Interno 1,0 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 100 cm, vol. Interno 3,5 mL, conector Luer Lock
Tubo Extensor Safeed, 150 cm, vol. Interno 1,5 mL, conector Luer Lock

Armazenagem

Não armazenar em condições de temperaturas extremas (acima de 40°C) nem em locais úmidos. Evitar a luz solar direta.

Tempo de Validade: 60 meses

Esterilização: ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO

Fabricado por:

Terumo Medical Products (Hangzhou) Co. Ltd.
M4-9-5, Economic & Technological Development Zone,
Hangzhou – 310018 – China

Importado e Distribuído por:

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.
Praça General Gentil Falcão, 108 conj. 91 e 92- Brooklin Novo- São Paulo-SP
C.N.P.J. 03.129.105/0001-33

Registro ANVISA: 80012280110
Resp. Téc. Daniela Félix de Almeida – CRBM-SP nº 10.146

Informações ao Consumidor: Fone: (0XX11) 35943800 E-mail: sac@terumo.com.br